



ViruProtect

STADA

Spray contra a constipação

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

ViruProtect STADA é um spray bucal contra a constipação. É fácil de utilizar e tem um início de ação rápido. ViruProtect STADA cria uma barreira protetora contra os vírus da constipação, revestindo a membrana mucosa da cavidade oral. Esta barreira fixa os vírus da constipação, desativando-os e dificultando os mesmos de se espalharem e multiplicarem.

INDICAÇÕES

Utilizar aquando da exposição aos vírus da constipação ou assim que surjam sintomas de constipação ou resfriado comum. ViruProtect STADA é indicado para adultos e crianças a partir dos 4 anos de idade.

USO PRETENDIDO

Tratamento e alívio da constipação.

BENEFÍCIOS CLÍNICOS

- ViruProtect STADA protege contra os vírus da constipação.
- ViruProtect STADA pode ajudar a diminuir a duração da constipação se for usado na fase inicial da infeção.
- ViruProtect STADA alivia os sintomas da constipação e dores de garganta.

PRECAUÇÕES

- Não utilizar em caso de hipersensibilidade/alergia a qualquer um dos ingredientes.
- Não utilizar durante a gravidez ou amamentação, pois não existe informação clínica disponível.
- Não utilizar após intervenção cirúrgica na boca e/ou garganta, sem consultar um médico, até que a ferida esteja cicatrizada.
- Não inalar ao aplicar o spray, pois pode causar irritação nas vias aéreas, resultando em tosse e rouquidão.
- Manter fora do alcance das crianças para prevenir acidentes com peças pequenas.
- Se tiver febre alta ou se os sintomas são mais severos que uma constipação normal, consulte o seu médico, poderá ser devido a qualquer outra causa.

- O dispositivo deve ser usado apenas por um utilizador de modo a evitar o contágio da doença.

CONTRAINDICAÇÕES

- Não são conhecidas contra-indicações

POSSÍVEIS EFEITOS SECUNDÁRIOS

- Não são conhecidos efeitos secundários.

Se tiver algum efeito indesejável ao utilizar ViruProtect STADA, por favor consulte um médico para aconselhamento.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Quando usar

Comece a usar o ViruProtect STADA assim que houver uma possível exposição ao vírus da constipação ou o mais rápido possível logo que tenha os primeiros sintomas de constipação. Continue a utilizar ViruProtect STADA até alívio dos sintomas.

Como utilizar

1. Abrir a boca e apontar o aplicador na direção da garganta (Figura 1)
2. Pulverizar 2 vezes (1 dose) a cada 2 horas, até 6 vezes ao dia e durante o tempo em que estiver exposto ao vírus da constipação.



FIGURA 1

COMO FUNCIONA ViruProtect STADA

O ViruProtect STADA consiste em dois ingredientes principais, o glicerol e a tripsina de bacalhau, que juntos formam uma barreira eficaz que atua de três maneiras:

Prende: O glicerol cria uma barreira osmoticamente ativa e transitória que prende o vírus.

Desativa: a tripsina inibe a capacidade de ligação do vírus, desativando a sua capacidade de infectar células.

Protege: A barreira ViruProtect STADA protege a cavidade oral e garganta.





DESCRIÇÃO DA DOENÇA: CONSTIPAÇÃO

A constipação é uma das doenças mais infecciosas causadas por vírus que entram no organismo através do nariz, boca e garganta¹. A constipação é causada por uma grande diversidade de vírus (aproximadamente 200¹), sendo o rinovirus o mais patogénico.

O tempo de incubação é de aproximadamente 48 horas, dependendo do tipo de vírus (média entre 0,5 e 4,5 dias²).

O sistema imunitário reage contra o vírus da constipação através de uma reação inflamatória. A reação inflamatória causa sintomas como dores de garganta, tosse, pingo no nariz e por vezes febre e espirros.

- A constipação dura habitualmente: 7-10 dias¹
- Um adulto tem normalmente 2-5 constipações por ano³
- Uma criança tem normalmente 7-10 constipações por ano³

VIRUProtect STADA ESTÁ DISPONÍVEL EM DUAS APRESENTAÇÕES DIFERENTES

VIRUProtect STADA 7 ml
VIRUProtect STADA 20 ml

A embalagem de VIRUProtect STADA contém:

- Spray bucal que consiste num frasco, numa bomba, num bucal e numa tampa.
- VIRUProtect STADA solução contém glicerol, água, a enzima natural tripsina do bacalhau, etanol (< 1%), cloridrato de cálcio, trometamol e mentol. A solução não tem açúcar, conservantes, glúten e lactose.
- Este folheto de instruções de utilização.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Usar antes da data de validade indicada no rótulo e na embalagem do produto.
- Conservar abaixo de 25°C.
- Devolver as embalagens não utilizadas à farmácia.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



Consultar as instruções de utilização



Limite máximo de temperatura



Data de validade



lote



Número de catálogo



Fabricante



Precaução, consulte as instruções antes de utilizar

Distribuidor:

Stada, Lda
Qta da Fonte -
Ed.D. Amélia
Piso 1 Ala B
2770-229
Paço de Arcos
Portugal



Fabricante:

Enzymatica AB
IDEON Science Park
SE-223 70 Lund,
Suécia
www.enzymatica.com

ColdZyme®



101016 VIRUProtect STADA 20ml
101117 VIRUProtect STADA 7 ml

DISPOSITIVO
MÉDICO

CE
0477

¹ Heikkinen, et al. "The common cold." The Lancet 361.9351 (2003): 51-59

² Lessler, Justin et al. Incubation periods of acute respiratory viral infections: a systematic review, The Lancet Infectious Diseases, Volume 9, Issue 5, 291-300.

³ Hull D, et al. Effects of creating a non-specific, virus-hostile environment in the nasopharynx on symptoms and duration of common cold.

Acta Otorhinolaryngol Ital. 2007 Apr; 27(2): 73-7.

9296328
2006
PT

L001PT-01
1083168

